




NORUCO

HAVE A LOOK INSIDE

MASCARILLAS FACIALES DESECHABLES TIPO IIR PEDIÁTRICAS TRATAMIENTO CON OZONO

REF: NR-MASKQRIIR-P

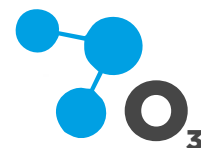

FABRICANTE PRODUCTO: NORUCO S.L.

DIRECCIÓN: Av/ de la Industria 53-55 ,41007
Sevilla
ESPAÑA

DESCRIPCIÓN

Mascarilla facial médica - Tipo IIR según normativa UNE-EN 14683:2019+AC:2019. Clase de riesgo I según reglamento (UE) 2017/745. Las mascarillas faciales quirúrgicas evitan que las partículas de gran tamaño expelidas por el usuario entren en contacto con el paciente o el entorno de trabajo. Las mascarillas de Tipo IIR cuentan con una eficacia de filtración bacteriana de más de 98 % y son resistentes a fluidos y salpicaduras. Tienen 5 años de caducidad.

CARACTERÍSTICAS

- Producto desinfectado al 99,99% durante el envasado mediante Ozono aplicado según reglamento de la UE 508/2012 uso de Biocidas
- Sujeción por banda elástica de algodón suave de gran comodidad
- Tres capas protectoras
- Cinta adaptable al tabique nasal

USO RECOMENDADO

Pensado para su uso por niños, ideal para evitar la transmisión y el contagio de enfermedades infecciosas.


INFORMACIÓN ADICIONAL

- BFE $\geq 98\%$
- Presión de resistencia a las salpicaduras ≥ 16 kPa
- Respirabilidad: Presión diferencial < 60 Pa/cm²
- Medidas: 145 x 95mm
- Almacenar en lugar seco a temperaturas entre 10° y 30°
- No estéril
- 100% Polipropileno
- Libre de fibra de vidrio
- Hipoalergénico
- Libre de látex

CAJA: 10 UNDS



MÉTODO DE USO

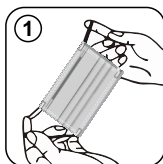

1. Extender con las manos la mascarilla para hacerla más ancha.


2. Colocar la mascarilla sobre la cara, empleando los elásticos sobre las orejas.

3. Presionar el clip de la parte superior sobre la nariz hasta obtener un ajuste perfecto sobre ella ajustando la mascarilla en general hasta obtener un buen ajuste y protección.

4. El ajuste debe abarcar la boca y nariz en su totalidad.

CARA EXTERNA


Sellado de los elásticos a la vista

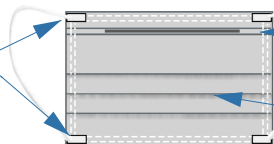

Clip arriba

Pliques hacia abajo

CARA INTERNA

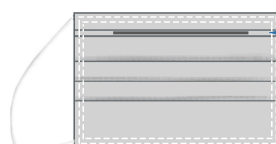

Clip arriba

Pliques hacia arriba